


# Die Verarbeitung Lichthärtende Basisplatten

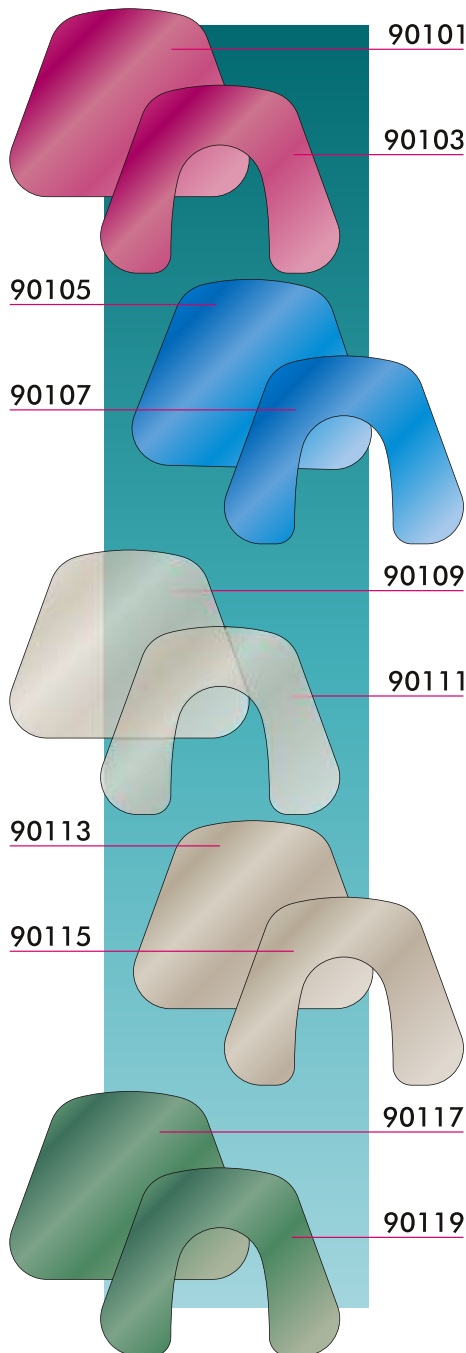

## Die Vorteile auf einen Blick

- Schnelle Herstellung der Basisplatten und Löffel
- Optimale Anpassung nach dem Aushärten
- Modelle müssen nicht isoliert werden

## Die Anwendungen

- Totale und partielle Modelle
- Funktionslöffel
- Individuelle Abdrucklöffel, Bissnahmen sowie Aufstelltechnik

## Die Verarbeitung

Die lichthärtenden Platten gleichmäßig auf das Modell legen, andrücken und überschüssiges Material mit einem Skalpell entfernen.

Das Material labial/buccal der Kieferform anpassen und von Hand glätten.  
Bei partiellen Modellen können OK und UK palatinal/lingual der Zahnform entsprechend mit dem Skalpell ausgeschnitten werden.

Je besser die Modellation vorgenommen wird, desto weniger Zeitaufwand entsteht bei der Ausarbeitung.

Die Platten mit UV-Licht ca. 5 Minuten aushärten, danach die endgültige Ausarbeitung vornehmen.

Weißlich erscheinende Schliiffstellen sollten mit Kunststoff-Monomer oder Vaseline benetzt werden; so erhalten sie ihre ursprüngliche Farbe zurück.

Die Basisplatten sollten unter 20°C gelagert werden.

**vigano**<sup>®</sup>  
DENTAL

Clemensstraße 14  
D 44 789 Bochum  
fon: 0234-301784  
fax: 0234-330545  
web: [www.vigano-dental.de](http://www.vigano-dental.de)  
email: [info@vigano-dental.de](mailto:info@vigano-dental.de)